

Кресло-коляска механическая детская

Руководство по эксплуатации



Barry C7 (7000 AT/К)

Кресло-коляска Barry C7 предназначена для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

Тип рамы: складная

Материал: алюминий

Высота спинки: 56 см

Подножки: съемные, регулируемые по высоте

Угол наклона сиденья: нерегулируемый

Колеса: цельнолитые

Особенности: съемный капюшон

Вес изделия: 9,5 кг

Габариты: 35 x 90 x 110 см

Макс. нагрузка: 50 кг

Важные предупреждения:

- Используйте коляску только на твердых и ровных поверхностях.
- При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов и лестничных пролетов) расположите задние колеса коляски по направлению движения (при подъеме следует тянуть ручки коляски на себя, при спуске – медленно опускать ручки коляски от себя).
- При посадке или высадке ребенка в/из коляски поставьте ее на стояночные тормоза.
- Перед использованием коляски закрепите боковые фиксаторы, расположенные на раме.
- Максимальная нагрузка - 50 кг.
- Срок службы/хранения: 5 лет

Порядок сборки:

1. Аккуратно распакуйте и достаньте коляску из упаковки.
2. Отстегните ремень-фиксатор и ослабьте Г-образный фиксатор спинки.
3. Чтобы разложить коляску, возьмитесь за ручку коляски, потяните вниз рычаг, расположенный на обратной стороне спинки, и затем тяните от себя рычаг, расположенный под сиденьем.
4. Чтобы сложить коляску, проделайте те же действия в обратном направлении.




Установка подножек:

1. Поочередно вставьте подножки в отверстия на раме коляски.
2. Установите подножки на нужной высоте, ослабив центральные болты на каждой подножке. Затем затяните верхние и нижние болты для фиксации.



3. Сдвиньте подножки друг к другу и закрепите расположенный под подножками фиксатор.

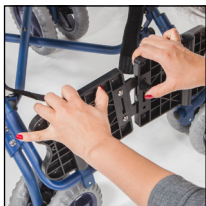

4. Установите держатель для голени.

Регулировка угла наклона подножек:

1. Ослабьте болты на обеих сторонах крепежных кронштейнов на подножках.
2. После регулировки угла наклона затяните болты.

Техническое обслуживание

Протирайте детали каркаса, обивку с помощью мягкого очищающего средства, воды и щетки. Раму кресла-коляски протирайте мягким моющим средством, затем сухой тряпкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

РУ №РЗН 2015/3412 от 14.12.15 г.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90

www.sims2.ru

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

